



RecoveryPulseTM Arm

Vibration Device

Powered by **QX-Micro Motor** TechnologyTM

PN: TB02760-01, TB02756-01, TB02752-01 TB02764-01, TB03016-01


Návod k použití

Začínáme

Krok 1

Nasazení rukávu

1. V rukávu najdete visáčku s kruhovým logem Therabody. Měl by se nacházet uprostřed ramene směrem ven, jakmile je rukáv správně umístěn (viz obrázek).
2. Zasuňte levou nebo pravou ruku do rukávu a plynule a jemně jej vytáhněte nahoru.
3. Ujistěte se, že je rukáv správně nasazen: kruhový štítek s logem Therabody je na rameni uprostřed směrem ven a kapsa na baterie je snadno přístupná pod štítkem. Logo Therabody by mělo být na horní straně předloktí, vedle vnější části zápěstí.
4. Vložte baterii do kapsy. Ujistěte se, že zlaté konektory směřují dolů a logo Therabody na baterii směřuje ven.
5. Vibrační terapii zapnete silným stisknutím tlačítka pod baterií po dobu 2 sekund.

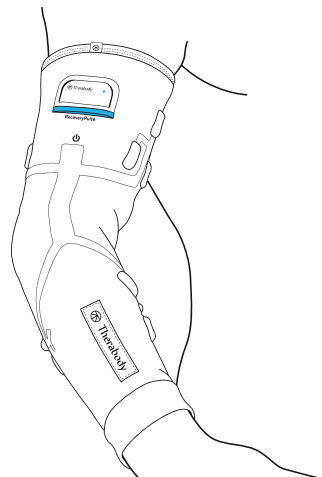

Popis produktu

Recovery Pulse Arm

Vibrační přístroj

Kompresní a vibrační terapie.

Od tvůrců Theragun® přichází RecoveryPulse, kompresní a vibrační terapie v jednom nositelném zařízení. Od přípravy na výkon, přes úlevu po tréninku až po celkovou pohodu - každý si zde najde něco pro sebe. Patentované lehké motory podél paže zlepšují zahřátí a zlepšují regeneraci.

Určeno k použití:

Vibrační zařízení RecoveryPulse Arm Vibration Device je určeno ke snížení bolestivosti a zlepšení pohyblivosti se zaměřením na biceps, triceps a předloktí. Toto nositelné vibrační zařízení je také určeno ke zvýšení průtok krve, aby pomohl zmírnit příznaky běžně spojené s akutní svalovou bolestí.

6. Dalším stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi různými režimy vibrační terapie.
7. Zařízení vypnete opětovným silným stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund.

Krok 2

Pociťte ten rozdíl.® Každý den.


Ať už je používáte mezi tréninky nebo pro celkovou úlevu, zhluboka se nadechněte a dopřejte si komfort, protože kombinace materiálu, integrovaných motorů a komprese vám pomůže udržet si co nejlepší pocit.

Důležité bezpečnostní pokyny naleznete v části Upozornění




Naskenujte QR kód a začněte.

Seznámení s produktem

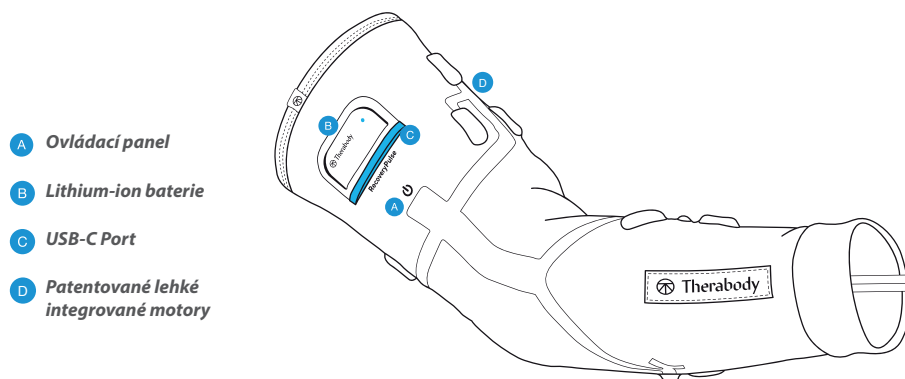

Použití RecoveryPulse Arm Vibration Device

1. Nasadte si vibrační rukáv na pravou nebo levou ruku. Správné nasazení poznáte podle toho, že logo směřuje nahoru a ven. (Viz obrázek 1).
2. Jakmile zaujmete pohodlnou polohu, zapněte integrované vibrační motory pevným stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund.
3. Opětovným stisknutím tlačítka přepnete rozsah vibračních frekvencí. Podle potřeby upravte frekvenci vibrací.
4. Chcete-li vibrační zařízení RecoveryPulse Arm vypnout, pevně stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekundy.

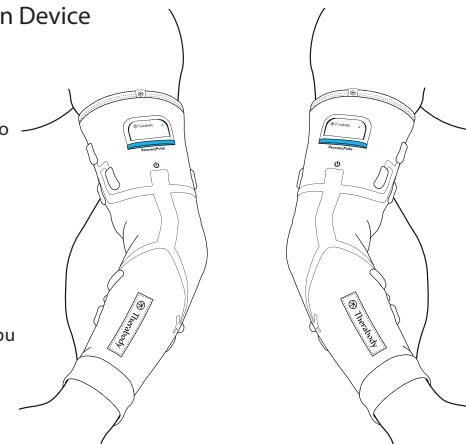

Obrázek 1

Přehled režimů

Pro celkovou regeneraci a úlevu od bolesti

Režim 1 - Nízký:

Vibrační terapie s nízkou frekvencí

Pro zahřátí a regeneraci po cvičení

Režim 2 - Vysoký:

Vibrační terapie s vysokou frekvencí


Pro relaxaci a zdraví

Režim 3 - Vlnový:

Přizpůsobený vzor od nízkých po vysoké frekvence pro maximalizaci kontrastu a stimulace nervového systému.

Pokyny k čištění:

1. Před čištěním vyjměte baterii.
2. Rukáv RecoveryPulse vložte do přiloženého pracího sáčku a vyperte v pračce na jemný režim při teplotě nižší než 30 °C.
3. Po vyprání položte na plocho a nechte uschnout. Rukáv RecoveryPulse NESUŠTE v sušičce. Poznámka: Před opětovným vložením baterie se ujistěte, že je pouzdro RecoveryPulse zcela suché.

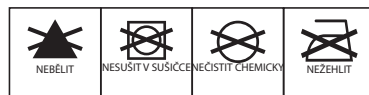

Poznámka: Před opětovným vložením baterie se ujistěte, že je pouzdro RecoveryPulse zcela suché.

Nabíjení

- RecoveryPulse Arm Vibration Device je vybaveno rozhraním USB-C.
- Součástí RecoveryPulse Arm Vibration Device je kabel Therabody USB-C na USB-A.
- Zařízení můžete připojit k jakémukoli standardnímu adaptéru USB.
- Port USB se nachází na pravé straně akumulátoru a je přístupný po vyjmutí akumulátoru z kapsy pouzdra.
- Stav nabití baterie je indikován na LED indikátoru baterie:
 - Červená: nízké nabití, modrá: střední nabití, zelená: plné nabití.
 - Při nabíjení bliká kontrolka LED, která signalizuje správné připojení, a po dokončení nabíjení se rozsvítí zeleně.
 - Stav nabití baterie můžete kdykoli zkontrolovat vložením baterie do pouzdra a jedním klepnutím na tlačítko napájení.

Poznámka: Ujistěte se, že nabíječka pochází od certifikovaného výrobce a že nedošlo k jejímu konstrukčnímu poškození. Zařízení nebude během nabíjení fungovat.

Dovozce/dovozca: Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika
Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.

RecoveryPulse™

by **Therabody**

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.

f @Therabody
@Therabody